



EVITEZ LA CONGELATION DES VACCINS!

Réfrigérateur à manteau de glace

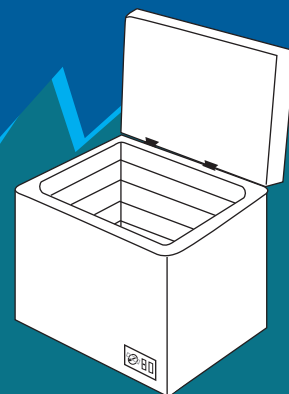


- ▶ Gardez les vaccins craignant la congélation à 20cm du bas du réfrigérateur.
- ▶ Ne laissez pas les vaccins craignant la congélation toucher les murs du réfrigérateur.
- ▶ Laissez de la place entre les boîtes de vaccins afin de laisser l'air circuler.
- ▶ Mettez un thermomètre et un indicateur Freeze Watch™ parmi les vaccins craignant la congélation.

Garnissez le bas du réfrigérateur avec des bouteilles d'eau ou des blocs de mousse afin d'isoler les vaccins du bas.

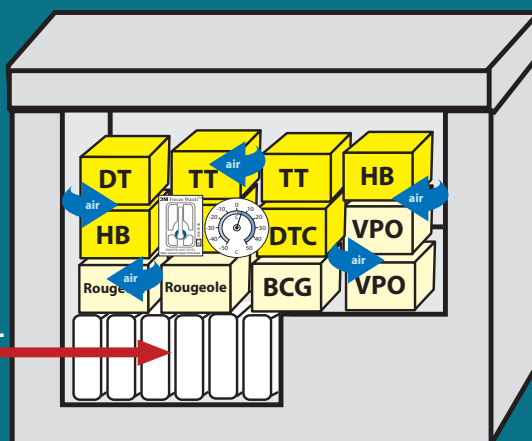

Surveillez la Température

▶ Réglez les Commandes du Réfrigérateur à manteau de glace

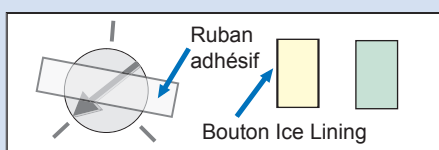


Réglez le bouton Ice-Lining sur OFF.

Ajustez le thermostat:


1. Réglez le thermostat sur MEDIUM.
2. Si après 3 jours la température passe en dessous de 2°C, réduisez le thermostat au réglage MINIMUM.

N'ajustez pas le thermostat après une coupure de courant ou bien si la température monte occasionnellement au-dessus de 8°C.

▶ Freeze Watch™

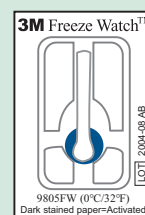

OK

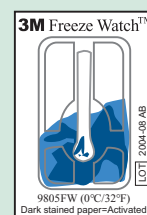

Congéle

Vérifiez les indicateurs Freeze Watch™ matin et soir.

Si le papier absorbant vire au bleu, testez les vaccins afin de savoir s'ils ont été congelés en utilisant l'épreuve d'agitation du vaccin (Shake Test).

Soutenu par le programme HealthTech à PATH grâce à un financement de l' USAID et le programme pour la vaccination des enfants à PATH.

La Congélation endommage les Vaccins de DTC, TT, DT et de l'Hépatite B !