

Praktik Penggunaan Oksitosin Dalam Uniject™* (10 IU dalam 1 ml)

1 Cek TTI pada paket Uniject untuk melihat apakah persegi bagian dalam lebih terang dari lingkaran luar.

Buang oksitosin jika persegi bagian dalam lebih gelap dibanding lingkaran bagian luar.


-  **Boleh digunakan**
-  **Gunakan terlebih dahulu**
-  **Jangan digunakan**
(Harus dibuang)
-  **Jangan digunakan**
(Harus dibuang)

2 Buka kantong foil dan keluarkan Uniject ini.




3 Uniject siap digunakan



- Pegang port Uniject dengan telunjuk dan ibu jari.
- Terus tekan dengan mantap hingga tidak ada celah antara jarum dengan port.

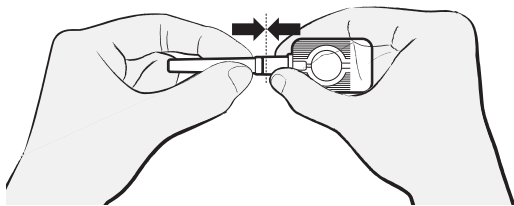


4 Lepaskan tutup jarum.

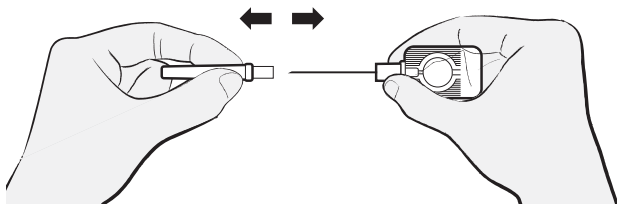


5 Terus memegang Uniject dan masukkan jarum ke tubuh pasien.

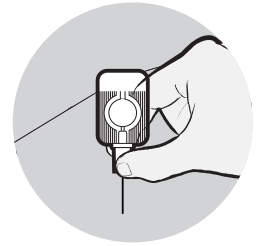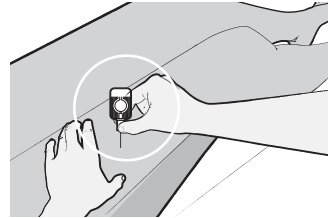

6 Remas reservoir dengan keras untuk menyuntikkan oksitosin. Setelah reservoir dipastikan masuk semua ketubuh pasien, buang Uniject.

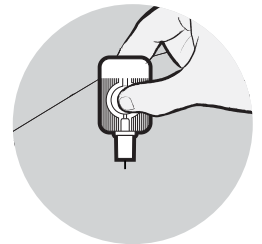

7 Jangan berusaha menutup kembali Uniject.

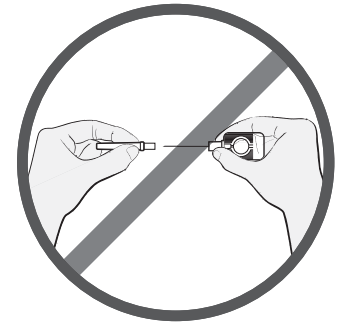

8 Setelah menggunakan Uniject, buanglah dalam wadah yang aman khusus untuk benda tajam.



*Uniject adalah sebuah cirri khas dari BD.

Copyright © 2011, Program for Appropriate Technology in Health (PATH). Materi dalam dokumen ini bebas digunakan untuk kepentingan pendidikan atau non-komersial, dengan syarat bahwa sumber materi harus dituliskan di dalam materi tersebut.